

# フェイスガード作り方

## フェイスガード (大)



### ①仕上がりイメージ

クリアファイルを付け替えればいつでも清潔な状態で利用できます。



### ②準備物 1

ご家庭にあるハサミとホッチキスをご準備下さい。



### ③準備物 2

市販のクリアファイルをご準備下さい。台紙を A4 コピー用紙に印刷しておきます。




### ④台紙を入れる

「ウエ」と記載されている方を上向きにして、台紙にクリアファイルを入れます。



### ⑤上をそろえる

台紙の上部とクリアファイルの上側をぴったり揃えます。

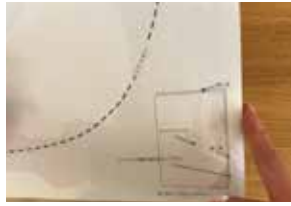

### ⑥右をそろえる

台紙はクリアファイルの右側に揃えます。(左側に隙間ができて大丈夫です)



### ⑦破線を確認

「キリトリセン」と記載されている破線がハサミを入れる破線です。



### ⑧ハサミを入れる

確認した破線に沿って、クリアファイルごと切り取っていきます。



### ⑨端まで切り落とす

クリアファイルの奥側には隙間がありますが、端まですべて切り落とします。



### ⑩続けて切る

もう一本ある破線も同様に、ハサミをいれて切り取っていきます。



### ⑪全部カットする

残りの破線も全部切り取ります。



### ⑫台紙をはずす

クリアファイル内に残った台紙を抜き取ります。



### ⑬パーツを重ねる

切り取ったクリアファイルの形とプラスチックパーツの重なり方を確認します。



### ⑭フチを揃える

クリアファイルの端とプラスチックパーツの端をきれいに揃えます。



### ⑮ホッチでとめる

プラスチックパーツの端は薄くなっており、ホッチキスで簡単にクリアファイルをとめられます。



### ⑯ホッチは 2 回打つ

はずれにくくするために、ホッチキスは 2 つとめておきます。



### ⑰反対側も同様に

反対側も同様にプラスチックパーツとクリアファイルをホッチキスでとめます。



### ⑱できあがり

これでフェイスガードのできあがりです！



### ⑲感染症対策に利用

顔を挟むだけなので簡単に装着でき、感染症対策にご利用いただけます。